


Rolyan® Sof•Stretch® Extension Splint:


A997-60 through 69, 5532-82-01 through 5532-82-10, 5604-14 through 5604-21

Rolyan® Sof•Stretch® Short Extension Splint:


A997-80 through 89 and 5532-81-01 through 5532-81-10
Trimline® Style: A300-10 through 14

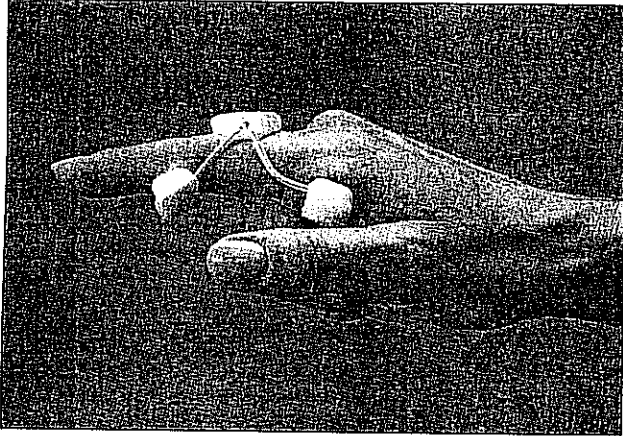


A

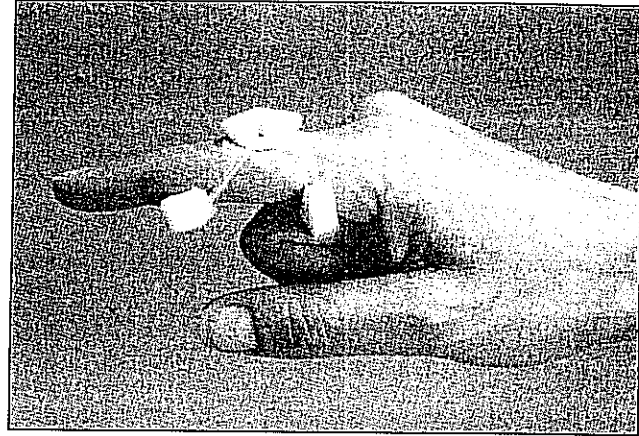

B

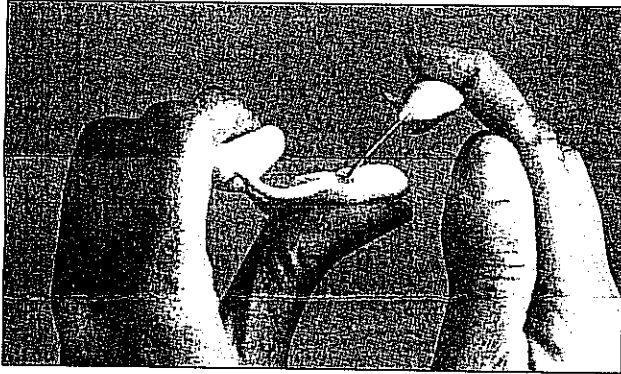

C

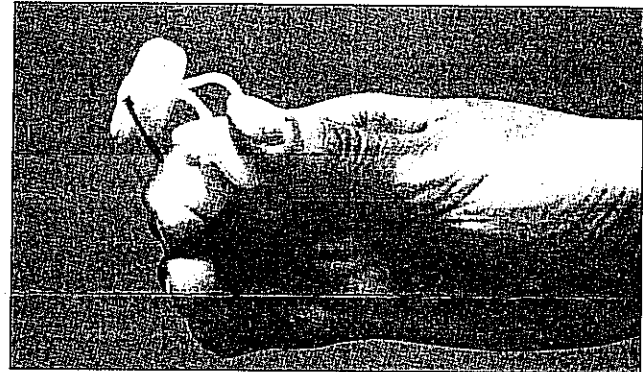

D

ITALIANO

Splint per estensione Sof•Stretch® Rolyan® e splint per estensione breve Sof•Stretch® Rolyan®

Assicurarsi di individuare lo splint usato e seguire le istruzioni ad esso pertinenti. A meno che non sia specificato altrimenti, queste istruzioni si riferiscono a tutti gli splint elencati.

INDICAZIONI

- Per contribuire a correggere la deformazione in occhio, le contratture della flessione e la rigidità dell'articolazione interfalangea prossimale

CONTROINDICAZIONI

- Non indicato per contratture ossee fisse risultanti dall'irrigidimento del tendine estrinseco o da altri cambiamenti strutturali
- Non indicato per articolazioni affette da instabilità mediale o laterale

PRECAUZIONI

- Questi splint vanno applicati inizialmente da un operatore sanitario che abbia dimestichezza con gli scopi per i quali sono stati ideati. Tale persona è responsabile di fornire ai medici, al personale sanitario addetto alla cura del paziente ed al paziente stesso le informazioni e le misure precauzionali da adottare nell'indossare gli splint.

- In caso di gonfiore insolito, discromia cutanea o disagio, l'uso dello splint va interrotto e va consultato un medico.

CURA E PULIZIA

Lavare e mano con acqua calda e detergente neutro. Prima di riutilizzare lo splint, farlo asciugare completamente all'aria.

APPLICAZIONE

Lo splint per estensione Sof•Stretch Rolyan è illustrato nella figura A e lo splint per estensione breve Sof•Stretch Rolyan è illustrato nella figura B (il modello Trimline, che presenta un cuscinetto prossimale più piccolo, va posizionato nello stesso modo).

Il cuscinetto prossimale è contrassegnato da una "P" (non nel modello Trimline, che ha un cuscinetto prossimale a forma di U).

1. Reggere i cuscinetti prossimale e distale e far scivolare delicatamente lo splint sul dito.

- Il posizionamento del cuscinetto prossimale dipende da quale splint si sta usando.

—Per lo splint per estensione Sof•Stretch Rolyan: posizionare il cuscinetto prossimale sulla superficie volare dell'estremità metacarpale.

—Per lo splint per estensione breve Sof•Stretch Rolyan (entrambi i modelli): posizionare il cuscinetto prossimale in posizione distale rispetto alla superficie volare dell'estremità metacarpale.

- Il cuscinetto distale va appoggiato in corrispondenza di o prossimale all'articolazione interfalangea distale.

2. Per aumentare la forza dell'estensione, togliere lo splint dal dito ed applicare pressione ai cuscinetti volari allontanandoli l'uno dall'altro raddrizzando lo splint (C).
3. Per diminuire la forza dell'estensione, togliere lo splint dal dito e spingere l'uno verso l'altro i due cuscinetti volari al di sotto del cuscinetto dorsale (D).
4. La larghezza dello splint può venire aumentata tirandone le barrette laterali verso l'esterno. Non cercare di apportare drastiche modifiche allo splint: se necessario, si consiglia di usare una misura diversa.